

TIGGES-Bandagen

1
-Stufen-
Therapie

Modul-Lumbalbandagen
mit Aufbauoption

L4-S1



TIGGES-Bandagen

TIGGES innovative Modul-Orthesen)



1 TIGGES-Bandagen


1-Stufen-
Therapie

Modul-Lumbalbandagen mit Aufbauoption

Wirkungsweise

Bei starkem Leib (mit oder ohne Erschlaffung der Bauchmuskulatur) wird die **Lendenwirbelsäule** unnatürlicherweise – durch ständigen Zug der Eingeweide nach vorne unten – belastet.

Die elastische Bandage sorgt für die Wiederherstellung eines **natürlichen Gegendruckes** der Eingeweide von vorne gegen die Wirbelsäule.

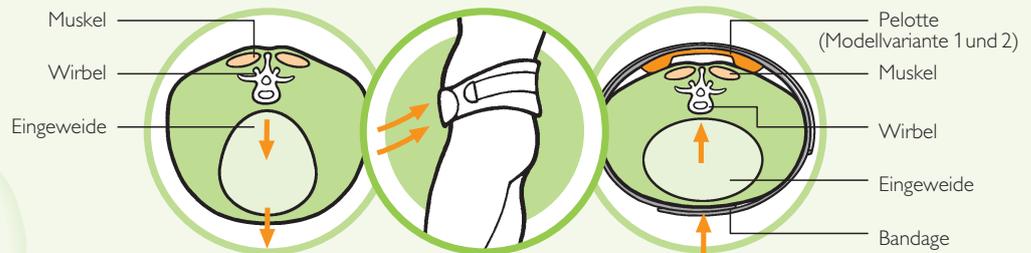

1 TIGGES-Modul-Wirbelsäulenbandage



Modellvarianten

1 TIGGES-Modul-Wirbelsäulenbandage

Die flexible Gliederpelotte überbrückt und entlastet den schmerzhaft erkrankten Bereich der LWS. Durch die Zuggurte wird der natürliche Gegendruck der Eingeweide von vorne gegen die Wirbelsäule deutlich verstärkt, die Wirbelsäule wird zusätzlich entlastet.

Indikationen

Akute (schwere) Lumbalgie, leichte Lumboischialgie, Radikuläres Lumbalsyndrom mit leichter Fehllhaltung ohne Parese. Spondylolysen ohne Wirbelgleiten. Mittelgradige lumbale Deformität (unkomplizierter Verlauf). Als Schutzbandage zur WS-Entlastung bei Patienten mit gelegentlich schwerer körperlicher Belastung – z. n. repetitiver Behandlung. Hyperlordose mit leichtem Hängebauch.

Rezeptur:

TIGGES-Modul-Wirbelsäulenbandage
Pos.-Nr.: 23.14.03.3000

2 TIGGES-Modul-Lumbalbandage P



2 TIGGES-Modul-Lumbalbandage P

Die flache flexible Gliederpelotte ermöglicht durch den segmentalen Aufbau eine größtmögliche Bewegungsfreiheit und vermindert hierdurch Atrophien. Hinzukommt eine leichte Massage der Lendenmuskulatur, die Folge ist eine bessere Durchblutung und Entspannung der meist verspannten Muskulatur.

Lumbalgie, muskuläre Dysbalance, Osteochondrose, Spondylarthrose.

Rezeptur:

TIGGES-Modul-Lumbalbandage P
Pos.-Nr.: 23.14.03.2000

3 TIGGES-Modul-Lumbalbandage Z



3 TIGGES-Modul-Lumbalbandage Z

Die Lumbalbandage wirkt über die Kompression propriozeptiv und regt den Stoffwechsel an. Der zusätzliche Unterstützungsgurt erhöht den Gegendruck von vorne gegen die Wirbelsäule und sorgt somit für eine zusätzliche Entlastung der LWS.

Leichte Lumbalgie, leichte muskuläre Dysbalance, leichte Osteochondrose, leichte Spondylarthrose.

Rezeptur:

TIGGES-Modul-Lumbalbandage Z
Pos.-Nr.: 23.14.03.1000

4 TIGGES-Modul-Lumbalbandage



4 TIGGES-Modul-Lumbalbandage

Die Lumbalbandage wirkt insbesondere über die Kompression propriozeptiv und regt den Stoffwechsel an, leichte Muskelverspannungen werden reduziert.

Sehr leichte Lumbalgie, sehr leichte muskuläre Dysbalance, sehr leichte Osteochondrose, sehr leichte Spondylarthrose.

Rezeptur:

TIGGES-Modul-Lumbalbandage
Pos.-Nr.: 23.14.03.0000

TIGGES innovative Modul-Orthesen)

TIGGES-Zours GmbH
D-45525 Hattingen
Am Beul 10

Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0
Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29
E-Mail tiggess@zours.de
Internet www.zours.de

CE
2009/022/0416