

# TIGGES / T-FLEX Modulares Orthesensystem

## T-FLEX Rekli Reklinationsorthese

HMV-Nummer  
23.15.02.0004

### Erforderliches Werkzeug


- mittlerer Kreuz-Schraubenzieher
- 2 Schränkhaken
- Innensechskantschlüssel 2,0 und 2,5 mm
- Bohrmaschine mit
  - Lochbohrer Metall 3,2 mm
  - Gewindeschneider 4,0 mm
- Permanent-Marker, z. B. Edding
- weißer Stift

## T-FLEX RSK Rahmenstützkorsett

HMV-Nummer  
23.15.01.0004



- 12 4er Pelotte
- 13 Elemente 6er Pelotte

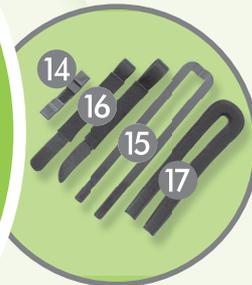


- 14 Adapter TL
- 15 Stabilisierungsbügel
- 16 Schultergurte
- 17 Polsterüberzug für Bügel

- 1 LWS-Miederunterteil
- 2 LWS-Miederoberteil
- 3 Unterstützungsgurt
- 4 Adapterpelotte dorsal
- 5 Federstahlstäbe starr
- 6 Rahmenspange unten
- 7 Reklinationsbügel hinten
- 8 Reklinationsbügel vorne
- 9 Rahmenspanngurt
- 10 Bauchpelotte
- 11 Polster Rekli



T-FLEX Rekli

- Metall-Elemente
- Kunststoff-Elemente
- Mieder-Elemente

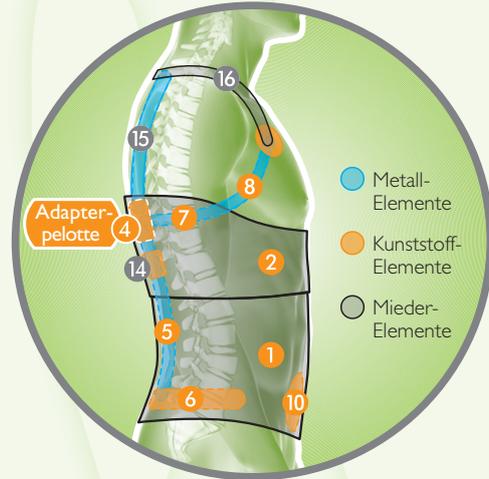

T-FLEX RSK

- Metall-Elemente
- Kunststoff-Elemente
- Mieder-Elemente

**TIGGES** innovative Modul-Orthesen



Patent angemeldet

# Techniker-Information

## Montieren der Orthese


1



Ausmessen der Rückenhöhe von knapp unterhalb der Schulterblätter (eine Fingerbreite Abstand halten) bis zur Linie oberhalb des Trochanter. Liegt dieses Maß über 35 cm, muss das LWS-Miederunterteil „hoch“ bestellt werden.



Zum Kürzen der Rückenstäbe werden von der gemessenen Rückenhöhe 5 cm abgezogen = ergibt die Länge der benötigten Federstahlstäbe 5. **Gekürzte Schienen abrunden.**

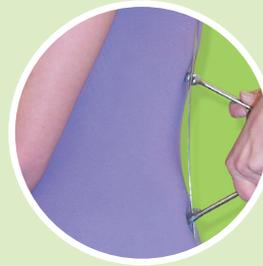

Federstahlstäbe 5 so anschränken, dass sie die natürliche Schwingung der LWS unterstützen/überbrücken.

**Achtung:** Die Enden der Stäbe (oben und unten je 4 cm) dürfen hierbei nicht verbogen werden.




Die Stäbe bis zum Anschlag in die Rahmenspange 6 und in die Adapterpelotte 4 einschieben.

2



Überprüfung des Sitzes am Körper. Der Unterstützungsgurt 3 kann hierbei als Hilfsmittel zur Fixierung am Patienten genutzt werden. Hierfür vorher das innere Klettstück durch ein Stück Flausch/Stoff abdecken, sodass die Kleidung nicht beschädigt werden kann.

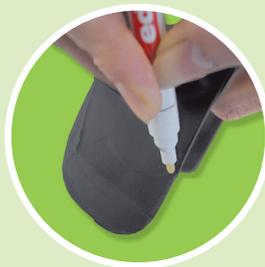

Anzeichnen der Änderungen an der Rahmenspange = evtl. kürzen (z.B. bei sehr schlanken Patienten).



Hinteren Reklinationsbügel 7 in Adapterpelotte 4 einschieben und so anschränken, dass das Gelenk mittig unterhalb der Achselhöhle sitzt.



Den vorderen Reklinationsbügel 8 im geeigneten Winkel ansetzen und ggf. so anschränken, dass die Reklinationspelotte leicht unterhalb des Schlüsselbeins anliegt.

3



Die Reklinationsbügel mit dem Abdeckplättchen verschrauben.



**nur Rahmenstützkorsett**

Den Stabilisierungsbügel 15 so anschränken, dass die bestmögliche Stabilisierung erzeugt wird. Ggf. den Bügel bei kleinen Patienten kürzen.



Vor dem Herausnehmen des hinteren Reklinationsbügels aus der Adapterpelotte markieren, an welcher Stelle der Bügel gekürzt werden muss (ggf. zunächst 1 cm Sicherheitsreserve lassen und später nachkürzen).

**Achtung:** Adapterpelotte zum Bearbeiten nicht in einen Schraubstock einspannen!



Stäbe der gegenüberliegenden Seite entsprechend anzeichnen und anformen. Alle Stäbe ggf. kürzen und abrunden und anschließend glatt schleifen.

4



Rahmenspanne z.B. mit Leder-  
schere kürzen (Zacken nach  
außen/vorher anwärmen) und  
die Kanten nachschleifen.



Rahmenspanne thermoplastisch  
nachformen (bis zu 140°C).  
**Achtung:** Rahmenspanne  
nur an den äußeren Rändern  
thermoplastisch bearbeiten,  
keinesfalls im Bereich der  
Schienentaschen oder da-  
zwischen – ansonsten besteht  
Bruchgefahr!



Hinteren Reklinationsbügel **7**  
in optimale Passform bringen  
(ggf. kürzen), an vorhandenen  
äußeren Löchern in der Adap-  
terpelotte **4** markieren und  
an dieser Position mit 3,2 mm  
Bohrungen sowie mit 4 mm  
Gewindebohrung versehen.  
**Achtung:** Nicht die inneren  
Löcher der Adapterpelotte  
verwenden (s. Beipackzettel).



Rahmenspanne in Miederunter-  
teil einsetzen und die Stahl-  
stäbe aufsetzen.

**nur Rahmenstützkorsett**

Den Adapter TL **14** auf die  
Stahlstäbe **5** aufschieben.

5



Das LWS-Miederoberteil **2**  
mit geöffneter Abdeckung von  
oben auf den Rahmen auflegen.  
Mit weißem Stift die Position  
der Austrittsstelle für die  
Reklinationsbügel markieren.



Mit Schere/Messer das  
Miederoberteil **2** an der  
angezeichneten Position ein-  
schneiden.  
**Achtung:** Nicht das hintere  
Miedermaterial beschädigen.



Polster Rekl **11** auf korrekte  
Länge kürzen und über  
Reklinationsbügel schieben.



Die Adapterpelotte **4** auf-  
setzen. Rahmen und Adapter-  
pelotte durch den Rahmen-  
spanngurt **9** fixieren.

6



Die Reklinationsbügel durch  
die Schlitz in das Mieder-  
oberteil führen und mit der  
Adapterpelotte verschrauben.  
Das Polster des Reklinations-  
bügels sollte glatt in der  
Miederöffnung liegen.

**nur Rahmenstützkorsett**

Das LWS-Miederoberteil an  
der Innenseite der Abdeckung  
unterhalb des Einfassbandes  
mit zwei Querschlitz so  
versehen, dass der BWS-Bügel  
von oben in die Adapterpelotte  
geschoben werden kann.



**nur Rahmenstützkorsett**

Stabilisierungsbügel **15** mit  
ggf. gekürztem Überzug **17**  
versehen. Den Stabilisierungs-  
bügel durch die Querschlitz  
und die Adapterpelotte **4**  
sowie den Adapter TL **14**  
hindurchschieben. Mit Flausch-  
klebepunkten Adapter TL und  
Bügel fixieren.



**nur Rahmenstützkorsett**

Schultergurte **16** hinzufügen  
und auf die richtige Länge ein-  
stellen.

7



Bauchpelotte 10 in geeignetem Winkel fixieren und möglichst tief in LWS-Miederunterteil vorne einsetzen.



Unterstützungsgurt 3 von außen aufsetzen (Zug von vorne unten nach hinten oben).



**Abschließende Anprobe** mit Sicherheitsprüfung, Einweisung in die Handhabung, Funktionsweise und Pflege.

## Therapeutisch korrekte Abschulung der **T-FLEX Rekli**

### Therapiestufe 2:

Die Orthese demontieren und die Rahmenbauteile bei Seite legen. Die mitgelieferte 4er Pelotte 12 mit den Elementen der 6er Pelotte 13 in das Miederoberteil und

-unterteil mittig einsetzen und die Abdeckung schließen. Den Unterstützungsgurt 3 hinten mittig auf die Mieder aufsetzen.

### Therapiestufe 3:

Das Miederoberteil entfernen und die blauen Elemente der 6er Pelotte 13 von der 4er Pelotte 12 abnehmen. Die Pelotte mittig in das Miederunterteil einsetzen. Der zusätzliche Unterstützungsgurt 3

kann wahlweise abgenommen werden. Es verbleibt eine langfristig nutzbare Lumbalbandage mit Pelotte.

### Allgemeiner Hinweis

Sofem es im unwahrscheinlichen Fall von gravierenden, nicht vorhersehbaren Produktmängeln zu schwerwiegenden Vorkommnissen wie z. B. Tod oder vorübergehender/dauerhafter Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten

bzw. Anwenders oder zu einer schwerwiegenden Gefahr für die öffentliche Gesundheit kommt, sind der Hersteller und die zuständige Behörde des Mitgliedsstaats umgehend zu informieren.



**TIGGES** innovative Modul-Orthesen



TIGGES-Zours GmbH  
D-45525 Hattingen  
Am Beul 10  
Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0  
Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29  
E-Mail tigg@zours.de  
Internet www.t-flex.de



Bitte lesen Sie die  
Datenschutzhinweise  
auf unserer Website  
[www.zours.de](http://www.zours.de)



00359/0221